

MECTRON OZOACTIVE

ASSEMBLAGGIO DISPOSITIVI PROFILASSI/OZOACTIVE



L'OzoActive produce ozono e lo inietta direttamente nei tubi di irrigazione degli apparecchi mectron fornendo acqua ozonizzata che riduce il rischio di contaminazione da funghi, batteri e virus attraverso l'aerosol. Il dispositivo OzoActive è compatibile con i dispositivi COMBI *touch* e Multipiezo della gamma mectron.



1 OZOACTIVE

Collegare pedale tramite presa jack



2 OZOACTIVE

Attaccare cavo di alimentazione elettrica

mectron

medical technology

MECTRON OZOACTIVE



3 OZOACTIVE

Collegare tubo più sottile del kit di irrigazione Prophylaxis



4 DISPOSITIVO MECTRON

Scollegare cavo pedale




5 DISPOSITIVO MECTRON

Collegare pedale tramite presa ethernet



6 DISPOSITIVO MECTRON

Apertura copertura della pompa rotante

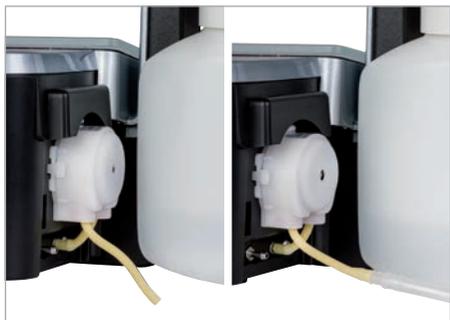

7 DISPOSITIVO MECTRON

Guardando la pompa rotante, disconnettere tubo di sinistra e connettere tubo-tubo



8 DISPOSITIVO MECTRON

Connettere tubo al raccordo sul dispositivo mectron

NB: fare attenzione alla freccia - indica la direzione dell'acqua (*)




9 DISPOSITIVO MECTRON

Chiusura copertura pompa rotante



10 DISPOSITIVO MECTRON

Riempire il circuito eseguendo ciclo Flush / Clean

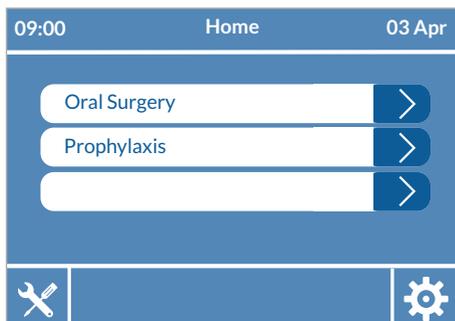

11 OZOACTIVE

Impostare il programma Prophylaxis, verificare il riempimento circuito e premere OK



12 OZOACTIVE

Regolare la quantità di ozono in base ai livelli di irrigazione impostati

LIVELLI IRRIGAZIONE	LIVELLI OZONO
1	1
2	2
3 (default)	3 (default)
4	4
5	5
6 (e 7 for COMBI touch)	6



13 TABELLA SETTAGGI

Impostare il livello di ozono in base al livello di irrigazione del dispositivo mectron come da indicazioni della tabella

14 DISPOSITIVO MECTRON / OZOACTIVE

Premere il pedale per iniziare

WARNING

- COMBI touch: OzoActive è utilizzabile solo con irrigazione da barattolo e quindi solo per ablazione ad ultrasuoni. Selezionare la funzione di irrigazione da barattolo. Il livello predefinito è 3. Utilizzare i pulsanti + e - per regolare il livello di irrigazione.
- NON UTILIZZARE per il trattamento con polveri. Prima di passare all'utilizzo della rete idrica e delle polveri, ricordarsi di staccare il pedale da OzoActive.