

MECTRON OZOACTIVE

ASSEMBLAGGIO PIEZOSURGERY® / OZOACTIVE



L'OzoActive produce ozono e lo inietta direttamente nei tubi di irrigazione degli apparecchi PIEZOSURGERY® fornendo acqua ozonizzata che riduce il rischio di contaminazione da funghi, batteri e virus attraverso l'aerosol.



1 OZOACTIVE

Collegare pedale tramite presa jack



2 OZOACTIVE

Attaccare cavo di alimentazione elettrica

mectron


medical technology

MECTRON OZOACTIVE



3 OZOACTIVE

Collegare tubo più sottile del kit di irrigazione Oral Surgery

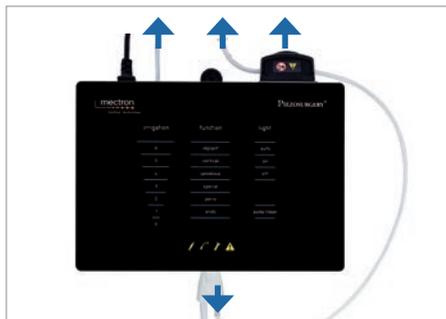

4 PIEZOSURGERY®

Scollegare cavo pedale e tubo pompa dal deflussore, dalla pompa e dal connettore manipolo



5 PIEZOSURGERY®

Collegare pedale tramite presa ethernet



6 PIEZOSURGERY®

Collegare tubo a manipolo - terminale con etichetta "HANDPIECE"

NB: fare attenzione alla freccia - indica la direzione dell'acqua (*)




7 PIEZOSURGERY®

Inserire tubo nella pompa peristaltica




8 PIEZOSURGERY®

Collegare tubo a deflussore

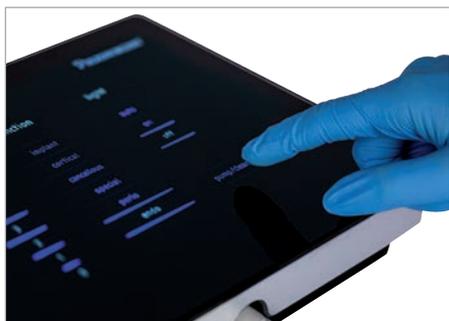

9 PIEZOSURGERY®

Riempire il circuito eseguendo ciclo Pump / Clean.

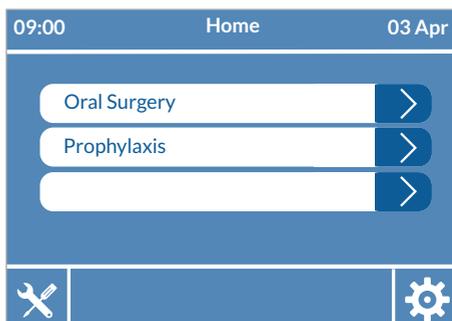

10 OZOACTIVE

Impostare il programma Oral Surgery



11 OZOACTIVE

Verificare che il circuito sia riempito e premere OK



12 OZOACTIVE

Regolare la quantità di ozono in base ai livelli di irrigazione impostati

LIVELLI IRRIGAZIONE	LIVELLI OZONO
1	1
2	2
3 (default)	3 (default)
4	4
5	5
6	6



13 TABELLA SETTAGGI

Impostare il livello di ozono in base al livello di irrigazione del PIEZOSURGERY®, come da indicazioni della tabella

14 PIEZOSURGERY® / OZOACTIVE

Premere il pedale per iniziare

! WARNING

- Il livello di impostazione predefinito di PIEZOSURGERY® e OzoActive è 3.
- Nella funzione Oral Surgery, assicurarsi che il kit di irrigazione sia collegato secondo la freccia di indicazione del flusso d'acqua.
- Non utilizzare il dispositivo in mancanza di acqua nel circuito e in caso di mancata erogazione di acqua.