

MECTRON PROFILASSI SCALING PARODONTALE COMPLETO




new!

mectron


→ NUOVI INSERTI PERIO ANATOMIC PER UNO SCALING PARODONTALE COMPLETO

La forma dei 3 inserti garantisce un accesso ottimale alle zone difficili da raggiungere, caratterizzate da tasche parodontali profonde o da particolarità anatomiche, come le forcazioni, le superfici radicolari e le concavità.

- Particolarmente indicati per uno scaling in tutta sicurezza
- La massima efficacia con la minor invasività nei confronti dei tessuti molli e del legamento parodontale
- I tessuti preservati permetteranno la formazione di un nuovo attacco
- Eliminazione delle tossine e del cemento necrotico
- L'effetto di cavitazione permette la disgregazione del biofilm, la dispersione dei batteri e favorisce la detossificazione delle tasche parodontali, grazie all'apporto di ossigeno

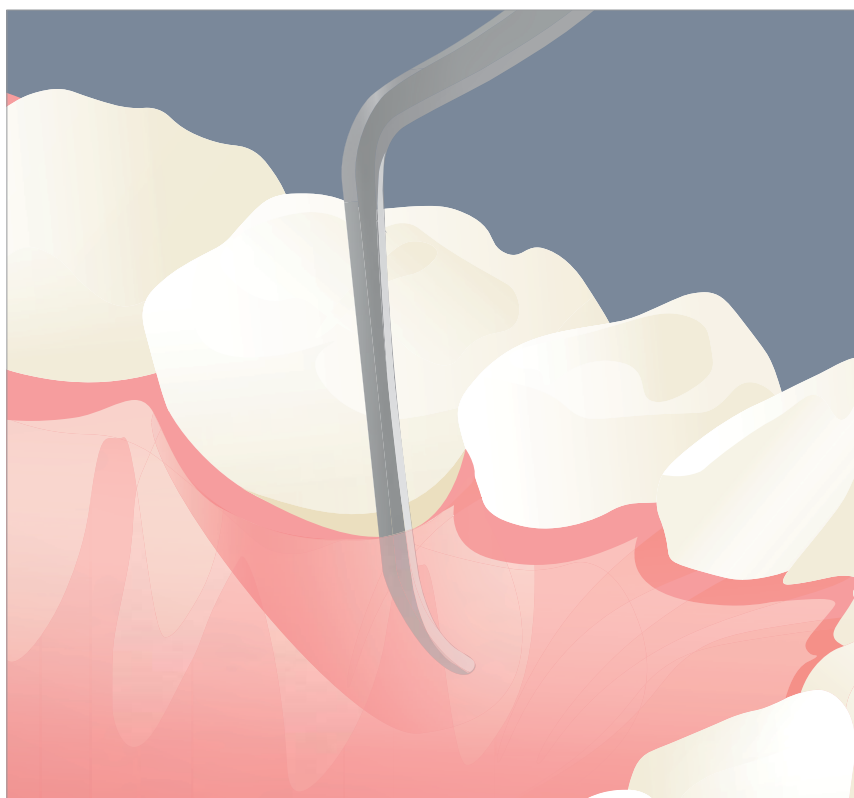


→ ULTRASUONI CON FUNZIONE SOFT MODE PER UNO SCALING ULTRA-DELICATO

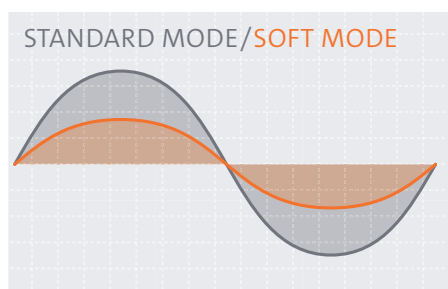

Si suggerisce di utilizzare gli inserti impostando il programma scaling/perio potenza 3 attivando la funzione soft mode. Il SOFT MODE riduce l'ampiezza delle oscillazioni, permettendo un movimento dell'inserto delicato, ma efficace. I pazienti più sensibili ne trarranno grande beneficio e saranno più propensi ad affrontare i trattamenti di igiene.



→ SCALING PARODONTALE COMPLETO LE INDICAZIONI CLINICHE

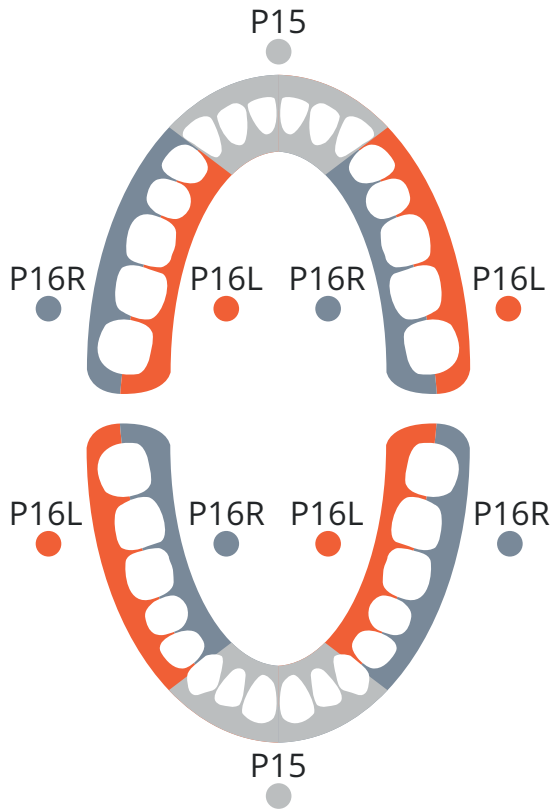


● P15
Settore anteriore



Facilità di accesso nelle zone anteriori e dei canini. Sostituisce le curette manuali n° 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

● P16R – ● P16L
Settori premolari e molari angolati a destra e a sinistra


Ideali per la levigatura radicolare dei settori molari e premolari. Sostituiscono le curette manuali n° 11-12, 13-14, 15-16, 17-18

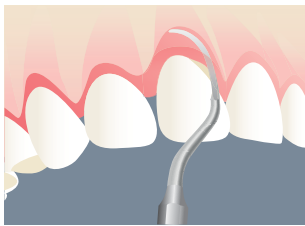

P15: curette universale per il trattamento sopra e sottogengivale. Ideale per il debridment delle tasche più profonde.

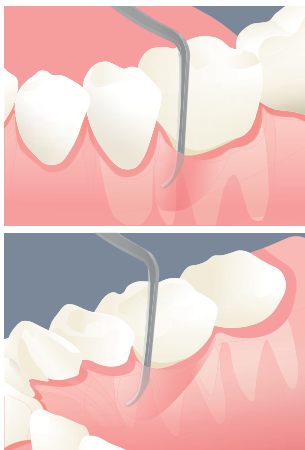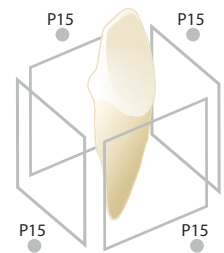

P16R – P16L: inserti a forma di curette angolati verso destra (P16R) e verso sinistra (P16L). Ideali per l'eliminazione di depositi e di biofilm sottogengivale nelle tasche più profonde e nelle forcazioni. Trattamento degli spazi interdentali sopra e sottogengivali.

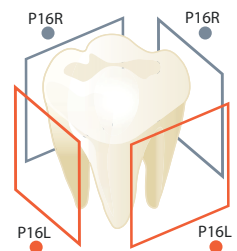

→ SCALING PARODONTALE COMPLETO GLI INSERTI IN DETTAGLIO



INSERTO P15

Codice 03080006

inserto a forma di curette universale con superficie arrotondata

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm sopra e sottogengivale. Ideale nei settori anteriori e canini. Debridement delle tasche più profonde.



INSERTO P16R

Codice 03080007

inserto a forma di curette parodontale angolato a destra

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm sottogengivale da forcazioni e tasche profonde. Ideale nei settori molari e premolari.



INSERTO P16L

Codice 03080008

inserto a forma di curette parodontale angolato a sinistra

INDICAZIONI: Asportazione di concrezioni e biofilm sottogengivale da forcazioni e tasche profonde. Ideale nei settori molari e premolari.

mectron s.p.a.
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, tel +39 0185 35361,
fax +39 0185 351374, www.mectron.it, mectron@mectron.com



© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.

mectron
medical technology